


Rina

Upute za proizvod/korisnički priručnik

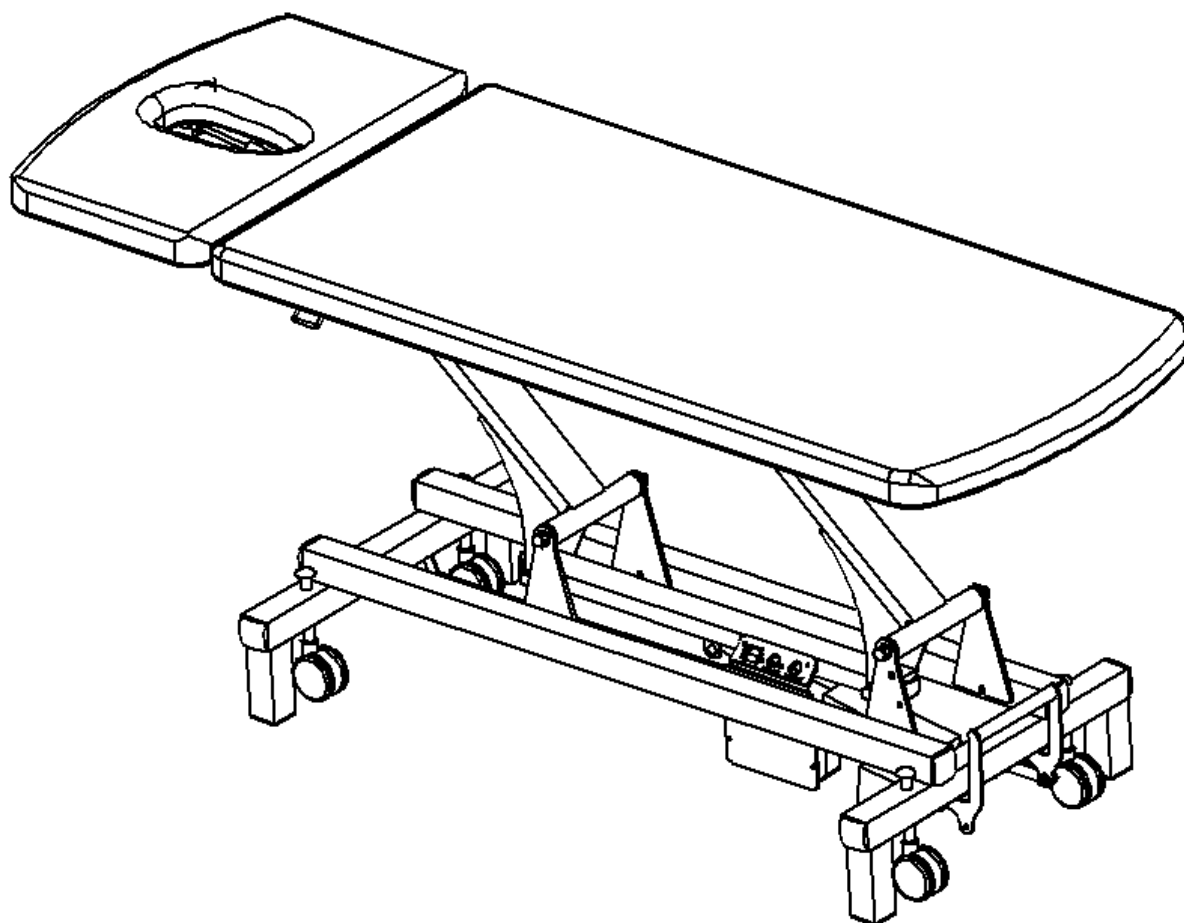

*** Prije uporabe proizvoda pročitajte upute.***


Priručnik sadrži detaljne upute za korištenje i održavanje opreme. Prije uporabe pročitajte i koristite u skladu s uputama.

Sadržaj

Procijenjena težina	P3
Obavijest po primitku robe.....	P4
Rina funkcija.....	P5-6
Upozorenje i mjere.....	P7
Uporaba RINA terapijskog stola.....	P8-9
Mjere opreza za čišćenje.....	P10
Mjere održavanja.....	P11
Rješavanje uobičajenih problema.....	P12
Garancija.....	P13

Procijenjena težina: **200KG**

Maksimalna nosivost gornjeg dijela je 40KG, a maksimalna nosivost sjedala je 200KG. Nemojte opteretiti stol težinom većom od preporučene. Ne skačite izravno na leđa kako biste izbjegli oštećenje strukture.

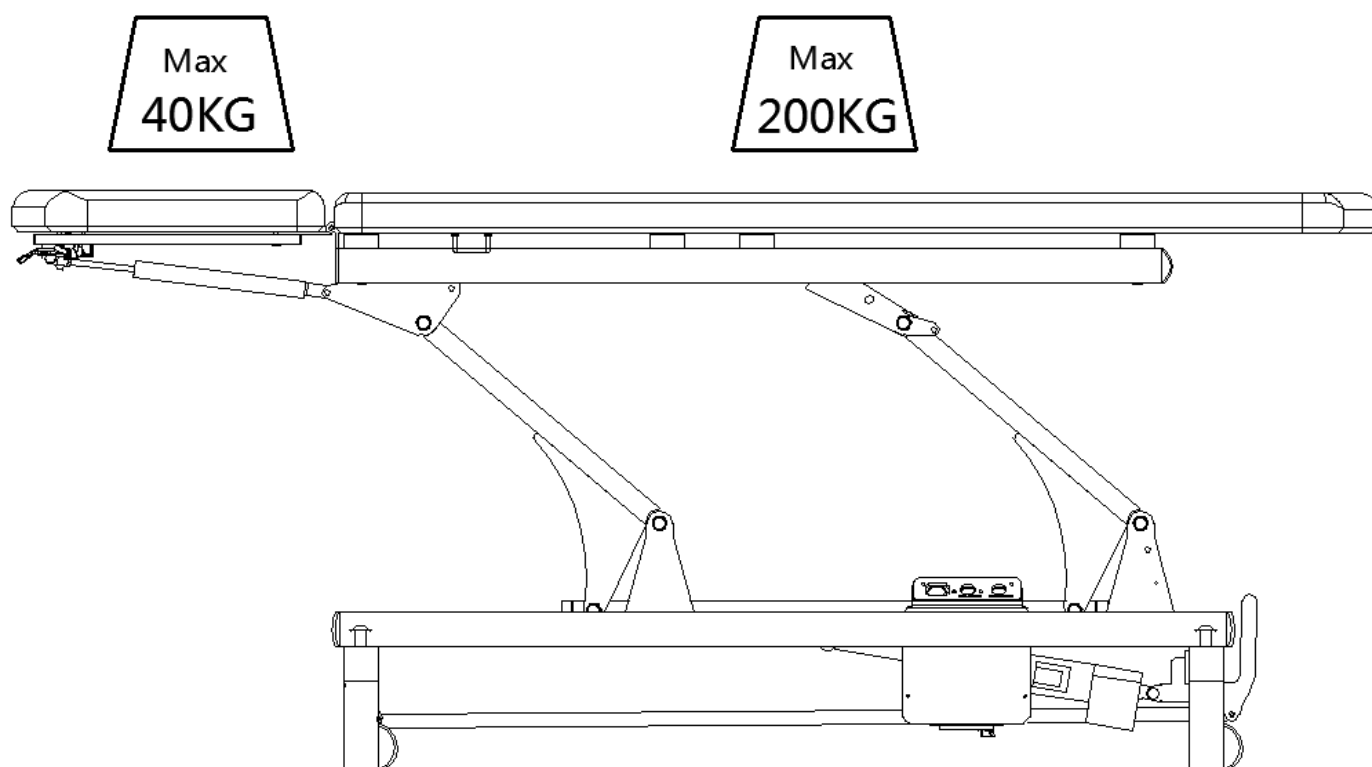


Obavijest po primitku robe.

Proizvode pakiramo u kartonske kutije s 10 slojeva papira. S njima jamčimo dobru zaštitu vaših proizvoda. Preporučamo da sačuvate originalno pakiranje za buduću upotrebu, posebno za povrat tijekom jamstvenog roka.

Radi vaše sigurnosti, za podizanje stola potrebne su dvije osobe. Prilikom podizanja, jedna osoba stoji na glavnom dijelu dok druga osoba stoji na kraju.

Ne zaboravite da se proizvod diže s glavnog dijela i na kraju, a ne sa strane.

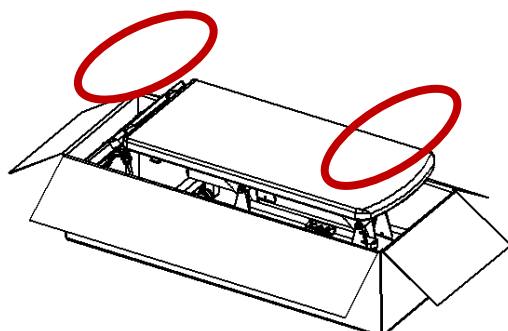

Provjerite je li paket netaknut ili nije oštećen u transportu prije korištenja. U slučaju problema, obavijestite tvrtku ili prodajno osoblje u roku od 2 dana od primitka robe. Ukoliko neki rezervni dijelovi nedostaju, obratite se na vrijeme prodajnom odjelu.

Krevet koristite u normalnom i suhom okruženju, gdje je temperatura između + 10° - 40° c i relativna vlažnost zraka između 30° - 75°. Ako kozmetički krevet može biti izložen temperaturama ispod 0°, postavite unutarnju temperaturu na odgovarajuću temperaturu u prostoriji najmanje 5 sati prije upotrebe.

Prije uporabe pročitajte sljedeće upute:


- (1) provjerite jeste li uklonili svu ambalažu.
- (2) provjerite može li se kozmetički krevet slobodno pomicati gore-dolje.
- (3) provjerite je li krevet smješten tamo gdje treba biti.
- (4) provjerite je li krevet spojen na izvor napajanja s odgovarajućim naponom.



Upozorenje! Djeca i neiskusne osobe ne smiju koristiti stol. Prije uporabe pročitajte upute. Djeca se ne bi trebala igrati oko stola. Radi sigurnosti, zaključajte stol i isključite kabel za napajanje dok se ne nadzire.

Predstavljamo stol Rina.

Stol Rina prikladan je za profesionalne terapeute i može se koristiti za masažu s raznim psihoterapijskim tretmanima. Sastavljaju cijeli krevet 2 glavna dijela koji se mogu namjestiti iz različitih položaja kreveta. Ručna kontrola može se pričvrstiti na igle s obje strane sjedala. Proizvod je namijenjen osobama starijim od 12 godina i visinom od 146 cm.

Rina Funkcija

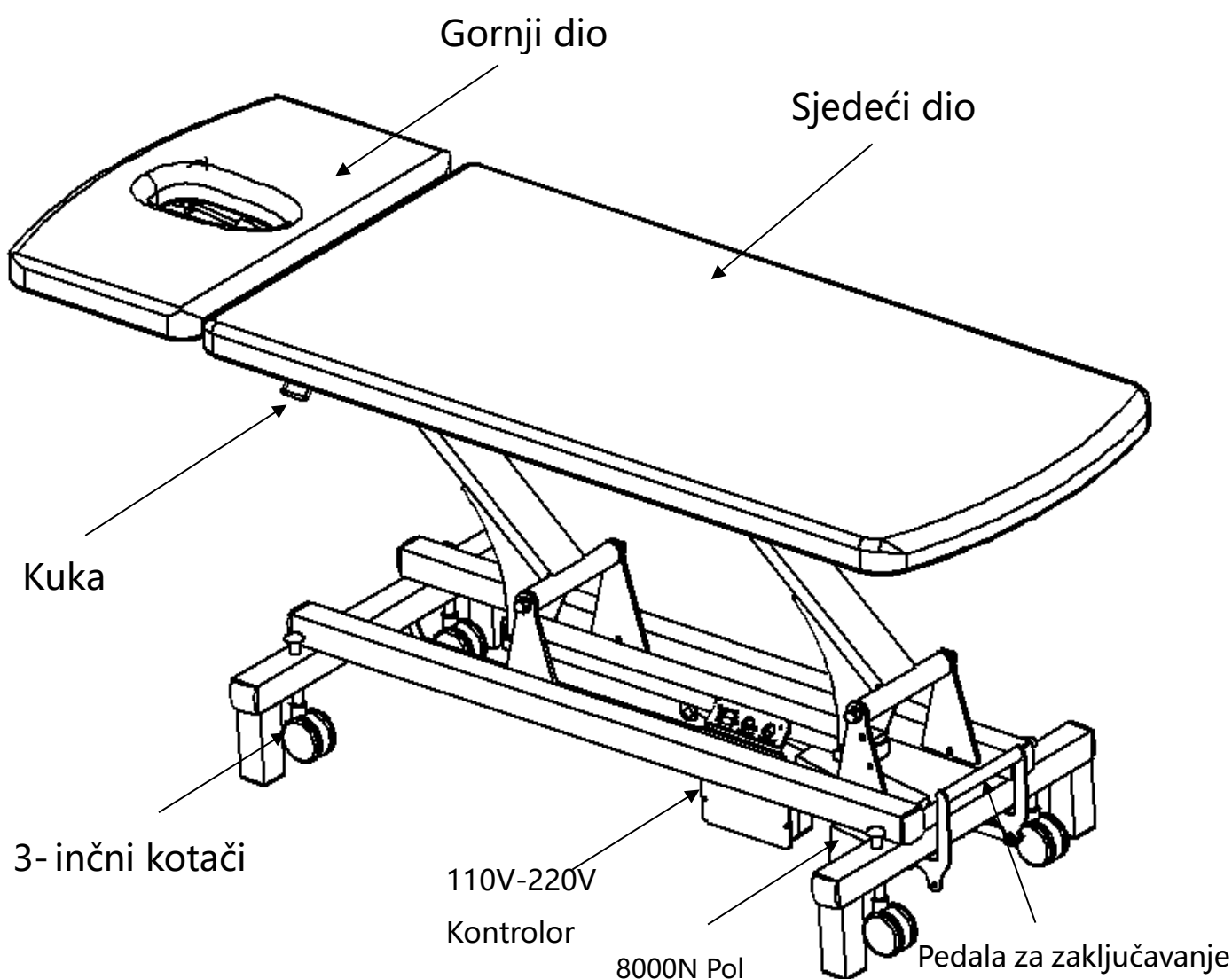

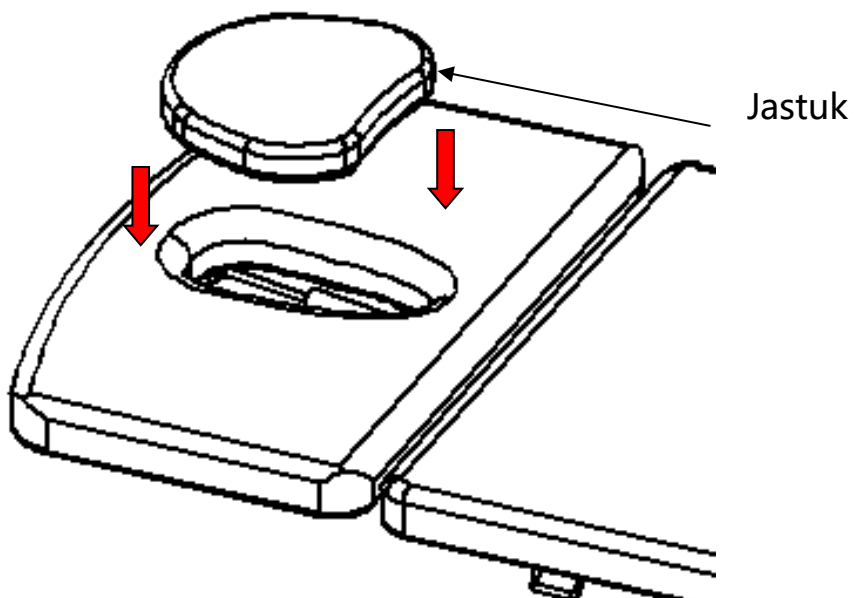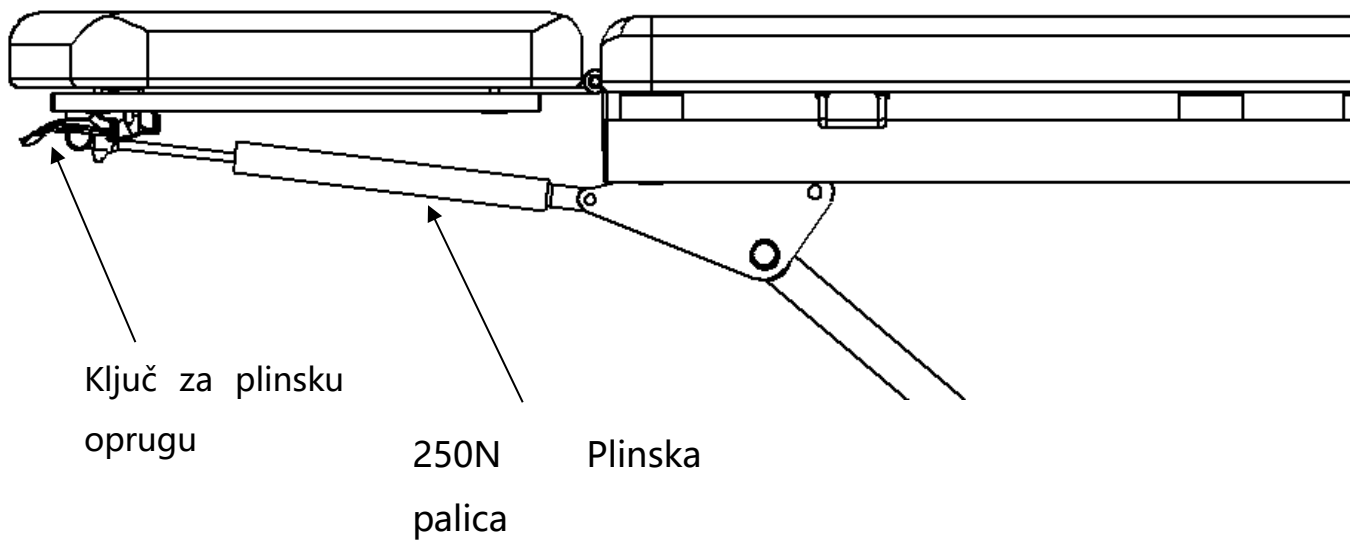



Upozorenje

1. Jastuk ne može izdržati punu težinu odrasle osobe.
2. Ne preporučamo skakanje po kozmetičkom krevetu.
3. Ne preporučamo sjedenje na glavnom i nožnom prostoru.
4. Ne koristite kozmetički krevet u blizini zapaljivih plinova.
5. Prije podizanja i spuštanja stola, provjerite ima li u okolini prepreka iznad ili ispod stola.
6. Ne opterećujte krevet.
7. Provjerite je li utičnica unutar 2 metra.



Pažnja



1. Radi sigurnosti, priključite napajanje u utičnicu.
2. Kako biste izbjegli oštećenje kabela za napajanje tijekom podizanja, nemojte povlačiti kabel za napajanje. U međuvremenu, provjerite može li se kabel za napajanje lako rastaviti u slučaju nužde.
3. Prije pomicanja stola, svakako uklonite kabel za napajanje kako biste izbjegli oštećenje rezervnih dijelova.
4. Ako je kabel za napajanje oštećen, isključite kabel za napajanje i odmah prestanite koristiti stol, obratite se našoj tvrtki za novi kabel za napajanje.
5. Uvjerite se da osoba koja nije operater ne pomiče nijedan od gumba za upravljanje kako biste izbjegli nesreću.
6. Treba vam dovoljno prostora oko stola.
7. Izbjegavajte oštre ili opasne predmete oko stola.
8. Ukoliko stol ne radi ispravno, prestanite ga koristiti i kontaktirajte Luxus plus d.o.o.
9. Stol se mora raspakirati prema uputama u ovom priručniku

Rad RINA kreveta


- (1) Umetnite kabel za napajanje u utor A,

110V ~ 240V Dostupno.



(2) Spojite ručnu kontrolu na MANUAL CONTROL

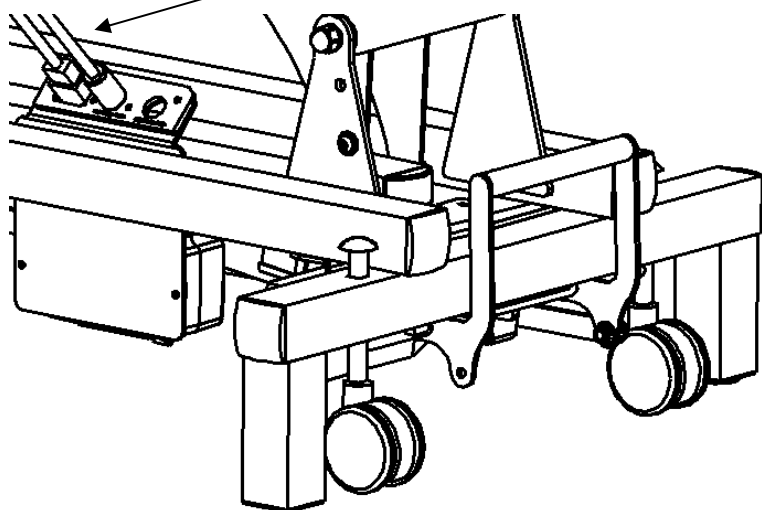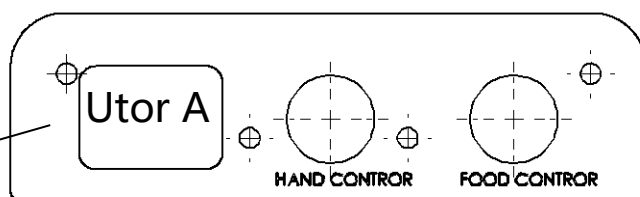

Funkcija upravljanja rukama (visina dizanja je 48-92 cm)

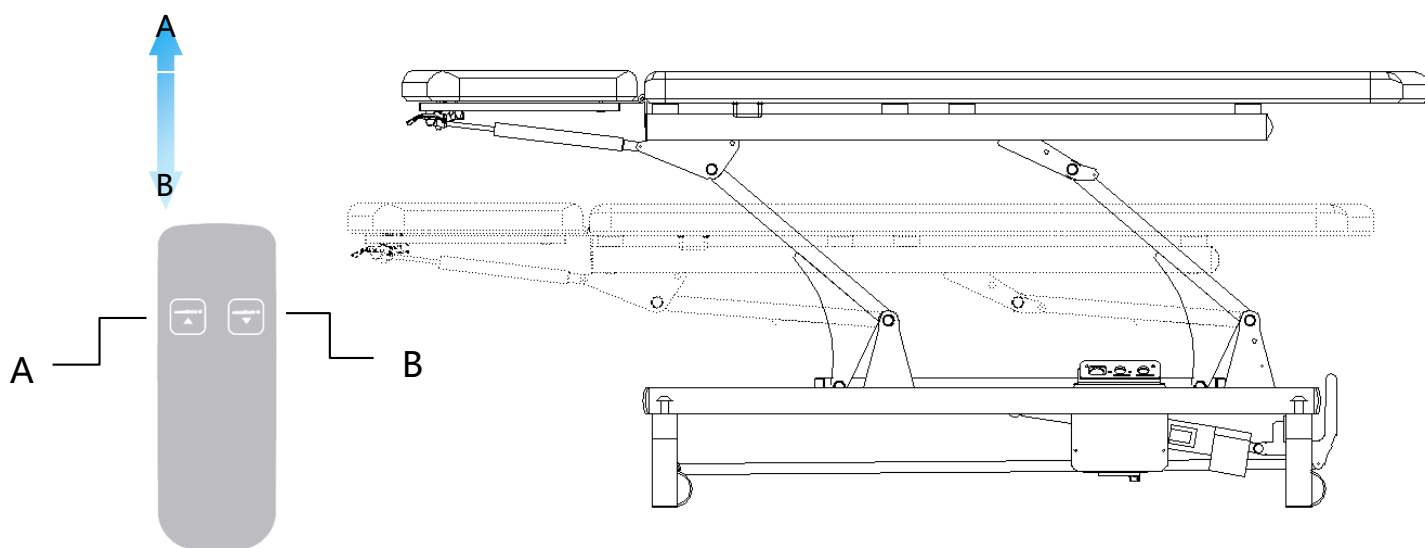

Za podešavanje stražnjeg kraja gore i dolje, samo zgrabite ključ za plinsku oprugu i namjestite ga pod određenim kutom. Kada se ključ otpusti, stražnji dio se zaključava.

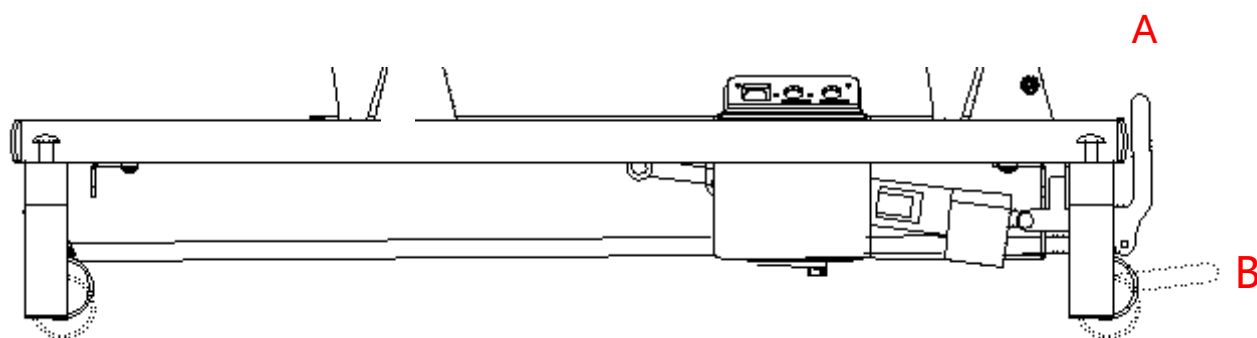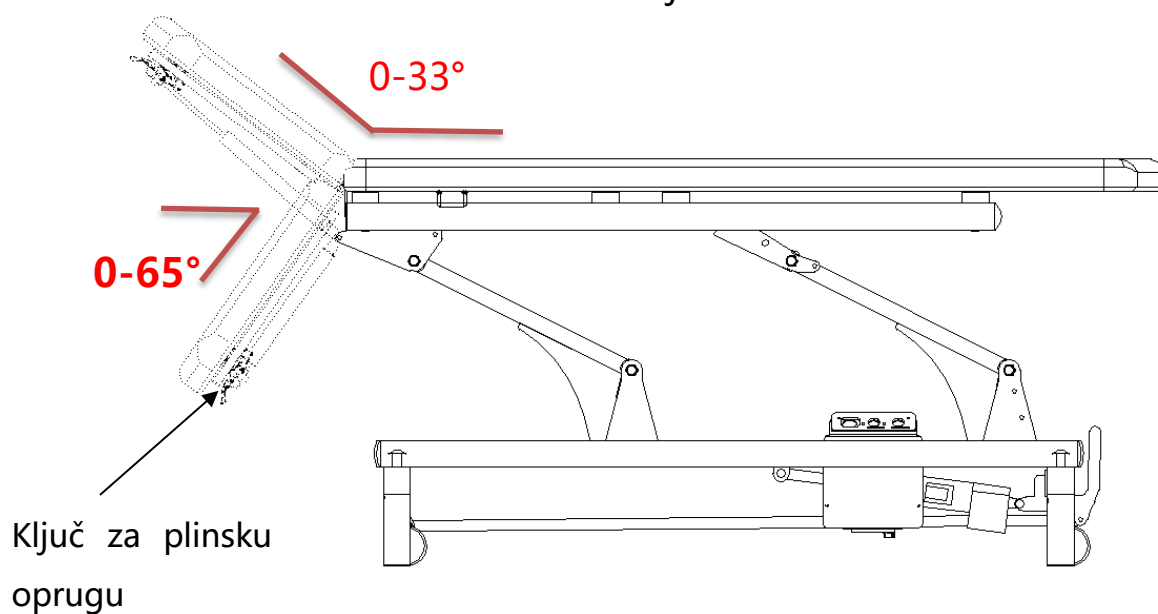

Stolica se ne može pomaknuti kada je pedala podignuta kao A;

Stolica se može pomicati kada se pedala pritisne kao B;

Mjere opreza za čišćenje i dezinfekciju

*** Isključite kabel za napajanje prije čišćenja.***

Kako bi površina kozmetičkog kreveta bila u dobrom stanju, redovito je čistite. Imajte na umu da se prije upotrebe stol mora očistiti i dezinficirati. Preporučuje se temeljita dezinfekcija jednom mjesečno.

I. Metalna i plastična površina

Očistite metalne i plastične površine i ručne tipke mokrom krpom ili slabom alkalnom otopinom za čišćenje. Koristite male četke u kutovima i drugim teško dostupnim mjestima. Tijekom čišćenja krpu isperite čistom vodom i pažljivo osušite. Nemojte koristiti previše tekućine ili dezinficijensa (alkohol ili klor) i slijedite upute proizvođača dezinficijensa, zatim isparite spremnik i osušite na sobnoj temperaturi.

II. Površina od nehrđajućeg čelika

Površina je vrlo otporna na kemikalije i mora se čistiti blagom otopinom deterdženta. Amonijak i većina otapala mogu se koristiti za uklanjanje jačih mrlja koje je teško odstraniti. Izbjegavajte korištenje kloriranih otopina ili kromiranja na metalnim površinama;

Provjerite jesu li sve površine suhe prije spajanja na struju i korištenja opreme,

Nemojte koristiti vodeni sprej za čišćenje (tuš, pištolj za vodu pod visokim pritiskom);

Nemojte čistiti na visokoj temperaturi i visokoj vlažnosti. Nemojte izlagati opremu okruženjima koja mogu dovesti do onečišćenja tekućinom.

Nemojte koristiti otapala za čišćenje; nemojte koristiti kiselinu za čišćenje;

Sterilizacija troši površinu. Nakon dezinfekcije očistite površinu čistom mokrom krpom.

III. Površina stola

Za brisanje površine stola koristite čisti, mekani ručnik s posebnim deterdžentom za kožu, koji ravnomjerno obrišete. Zatim ga ponovno obrišite čistim mekim ručnikom. Nemojte dodirivati površinu stola mokrom krpom, tvrdim, kiselim ili alkalnim kemikalijama kako ne biste utjecali na kvalitetu površine i vijek trajanja.

Održavanje

*** Prije održavanja, isključite kabel za napajanje i provjerite je li funkcija isključena ***

- ① Pažljivo pročitajte upute
- ② Održavanje zahtijeva iskusnog i ovlaštenog proizvođača. Održavanje od strane neovlaštenog osoblja može uzrokovati ozljede ili oštećenje opreme za koje proizvođač nije odgovoran.
- ③ Dopušten je samo originalni hardver provjeren od strane proizvođača.
- ④ Nemojte koristiti stol ili njegove dodatke, ako ne radi kako treba, prvo odspojite kabel za napajanje i upotrijebite sigurnosni prekidač, a zatim kontaktirajte odjel prodaje.
- ⑤ Sve aktivnosti održavanja i popravka moraju se zabilježiti.

Mjere održavanja

Kontrolu, njezino ožičenje, stanje i funkcije provjerite jednom tjedno.

Sljedeće armature treba provjeriti najmanje svakih šest mjeseci:

1. Kabel za napajanje i njegov priključak
2. Ožičenje motora
3. Kontrolna kutija i njeno ožičenje
4. Okovi su pričvršćeni i osigurani
5. Normalan rad sustava za zaključavanje
6. Dovršite sva podešavanja i uvjerite se da stol ispravno radi

Ako pronađete bilo kakvu grešku, prestanite koristiti opremu. Ako smatrate da uzrokuju buku ili smetnje, obratite se odjelu prodaje. Samo ovlašteno osoblje smije otvoriti ili zamijeniti poklopac ili upravljačku jedinicu.

Ako je bilo koji dio opreme oštećen, isključite kabel za napajanje i prestanite koristiti opremu. Obavijestite odjel prodaje kako biste bili sigurni da su svi dijelovi ispravno instalirani nakon bilo kakvog održavanja.

Često rješavanje problema

Št.	Problemi	Rješenja
1	Ručna kontrola ne radi	Promijenite položaj utikača za ručno upravljanje koji se spaja na upravljačku kutiju (provjerite ima li problema s motorom). Imajte na umu da se mora odrediti izvorni položaj utikača.
2	Električni motor ne radi	Promijenite položaj utikača motora

Ako želite zamijeniti kontroler i naručiti drugu rezervnu opremu, obratite se servisu i opišite sljedeće podatke:

1. Model

2. Datum kupnje

Garancija

Jamstveni rok je unutar dogovorenog roka, osim ako nije drugačije dogovoreno. Jamstvo na materijale i motore je tri godine, a na ranjive armature (električne vodove) jamstvo je godinu dana.

Uvjeti jamstva: Jamstvo vrijedi samo ako se uz jamstveni zahtjev priloži originalni račun ili narudžbenica ili (potvrda) narudžbe.

Proizvod je dizajniran i proizveden u skladu sa zahtjevima CE standarda. Ako proizvod treba prilagoditi drugim lokalnim/nacionalnim tehničkim ili sigurnosnim standardima, smatra se da nema grešaka u materijalu ili procesu.

Ovo jamstvo ne uključuje nijedan od sljedećih uvjeta:

1. Oštećenje zbog normalnog trošenja i habanja tijekom svakodnevne uporabe i održavanja, zamjena ili zamjena okova tijekom periodičnog pregleda
2. Oštećenja uslijed prijevoza, izlaganja ili postavljanja proizvoda
3. Oštećenje proizvoda zbog neuporabe proizvoda u skladu sa smjernicama ili nepravilne instalacije.
4. Prirodne katastrofe (grom, poplava, požar) i štete uzrokovane ratom, javnim smetnjama, nenormalnim naponom napajanja ili bilo kojim drugim elementima izvan kontrole
5. Oštećenja uzrokovana kemikalijama, tekućinama ili bilo kojom opasnom tvari koja može utjecati na proizvod
6. Manji nedostaci i odstupanja proizvoda koji ne utječu na vrijednost ili funkciju proizvoda mogu se zanemariti.

Sljedeći postupci moraju se izvršiti za jamstveni zahtjev.

Prvo kontaktirajte odjel prodaje i opišite problem (fotografijama ili video zapisima) te ih obavijestite o proizvodu i vremenu kupnje. Naši tehničari pomoći će vam pronaći nedostatke i pogreške i obično će vam ponuditi rješenja putem telefona ili e-pošte. Ako je potreban jamstveni servis, proizvod se mora vratiti dobavljaču ili tvornici. Mi ćemo podmiriti troškove materijala/rezervne opreme i rada kao i odgovarajuću naknadu te ponuditi odgovarajuće rješenje.

Ako je krevet zamijenjen nedozvoljenim okovom, jamstveni servis ne vrijedi! (popravci od strane neovlaštenih osoba ili osoba bez iskustva, te ove mjere održavanja dovode do kvara proizvoda, ili uporaba neprikladnih deterdženata za čišćenje koji dovode do kvara proizvoda, ili nepoštivanje redovitog održavanja u skladu s uputama, također se smatraju poništavanjem jamstva .)