


NAVODILA ZA UPORABO

Saeyang Marathon Cyclone podiatrični rezkalnik
z absorberjem



CE


Imena in funkcije sestavnih delov

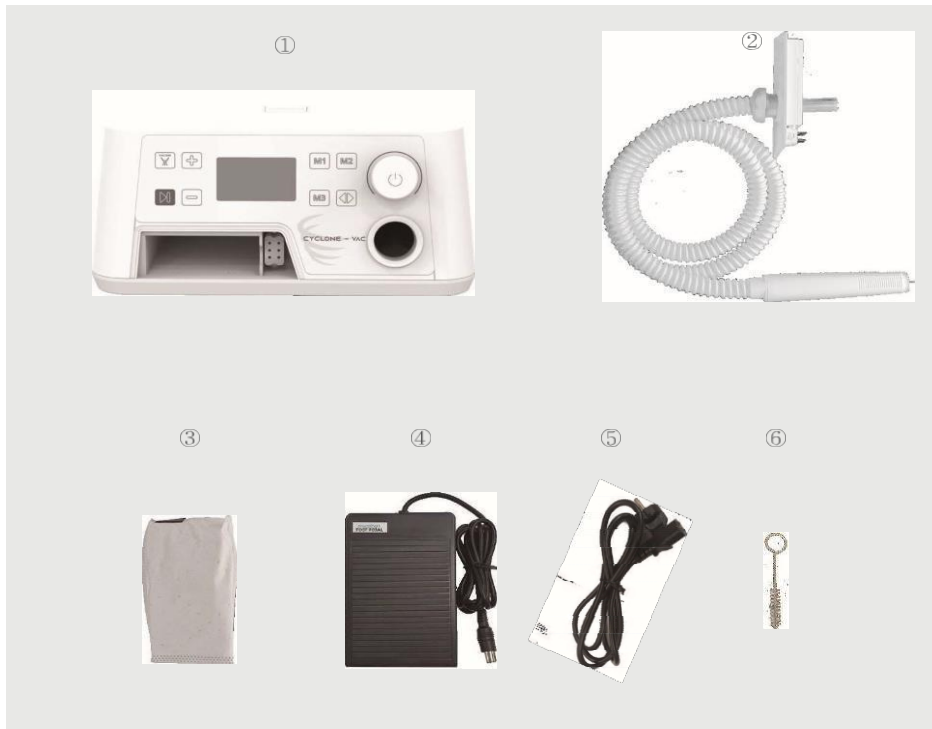


	Ime	Funkcija
1	Nadzorna enota	Nadzor hitrosti, smeri vrtenja itd.
2	Delovna glava	Delovni del
3	Vrečka za prah	Shranjevanje prahu, ki ga poseša glava
4	Nožni upravljalnik	Nožno stikalo za nadzor hitrosti glave
5	Napajalni kabel	Napajanje stroja za rezkanje


6	Orodje za čiščenje vpenjal	Orodje za čiščenje konca glave
---	-------------------------------	--------------------------------

Konstrukcija naprave

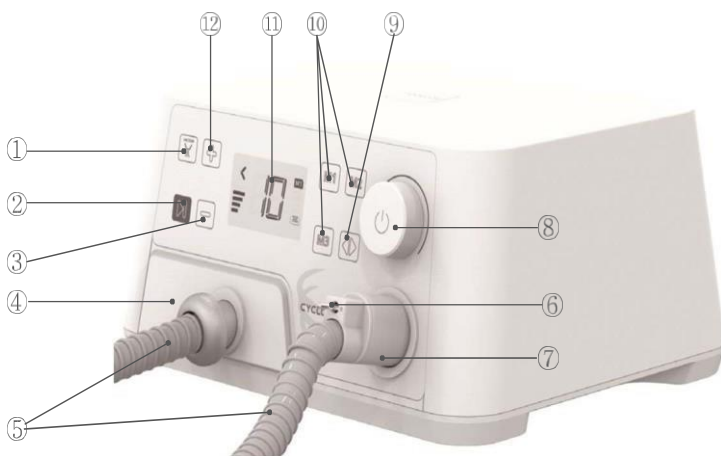

	Ime	Funkcija
1	Gumb vklop/izklop sesanje	Vklop/izklop absorberja
2	Gumb Start/Stop	Vklop/izklop sesalnega motorja in glave
3	Gumb za zmanjšanje sesalne moči	Zmanjšanje moči absorberja
4	Prevleka za vrečko za prah	Nosilec/pokrov za vrečko za prah
5	Sesalna cev	Odvajanje prahu v vrečko
6	Stikalo za vklop/izklop	Vklop/izklop sesanja in delovanje delovne glave
7	Vodja	Delovni del
8	Gumb in hitro izbiranje	Vklop/izklop LCD-zaslona in povečanje/zmanjšanje hitrost
9	Gumb za spreminjanje smeri vrtenja podajalnika	Nastavitev smeri vrtenja podajalnika
10	Gumb za pomnilnik	Shranjevanje nastavitvev
11	LCD	Prikaz stanja
12	Gumb za povečanje sesalne moči	Povečanje hitrosti absorberja

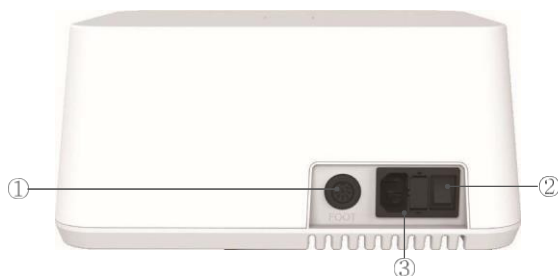

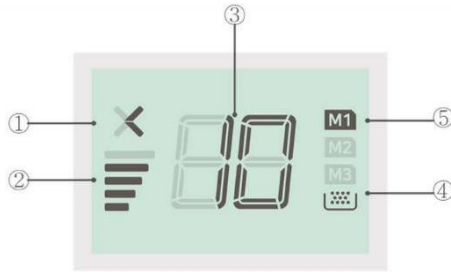

	Ime	Funkcija
1	Priključek za nožni upravljalnik	Priključitev nožnega upravljalnika
2	Gumb za vklop	Vklop/izklop napajanja
3	Priključek za napajanje	Priključitev napajalnega kabla

Zaslon LCD

1.

2.

3.

4.

5.



1. Smer vrtenja glave (desno vrtenje, levo vrtenje).
2. Hitrost glave
3. Sesalna moč
4. Ikona vrečke za prah (zamenjava vrečke za prah z novo).
5. Spomin

	Ime	Funkcija
1	Smer vrtenja glave	Prikaz smeri vrtenja motorja
2	Sesalna moč	Indikator stopnje moči sesalnega motorja

3	Hitrost glave	Prikaz hitrosti glave (x1000, 400 ~40000)
4	Ikona vrečke za prah	Obvestilo, ko je treba zamenjati vrečko za prah
5	Spomin	Prikaz številke shranjenega pomnilnika


Pozor,

Ko funkcijo sesanja uporabljate skupno vsaj 10 ur, se prikaže ikona za zamenjavo vrečke za prah. Po zamenjavi vrečke za prah držite gumb za vklop/izklop sesanja 2 sekundi, da odstranite ikono za zamenjavo vrečke za prah.

Namestitev

Pozor,	
Okolje namestitve (električne značilnosti, značilnosti lokacije, temperatura, vlažnost itd.).	Previdnost pri namestitvi
Krmilno enoto je treba uporabljati na mestu, kjer se notranja temperatura vzdržuje na primerni ravni. (0~40°C) Naprave ne uporabljajte v umazanem ali zelo vročem in vlažnem prostoru.	Krmilna enota mora biti nameščena na ravni površini, brez motnje periferne opreme. - Izogibajte se blokiranju prezračevanja spodnje plošče nadzorna enota. Izdelka ne uporabljajte na mestu, kjer je težko napajati z električno energijo ali ločiti vtič.

1-1. Glavno napajanje

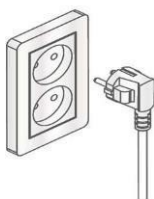

Polje z varovalkami




Varovalka

- ① AC 220-240V, 50/60Hz
- ② 3.15A 250V

Rezervna varovalka je skrita v škatli z varovalkami v vgrajenem delu.

Povezava

1. Ročni del, priključek vrečke za prah
Priključite priključek z vrečko za prah na sesalno odprtino.

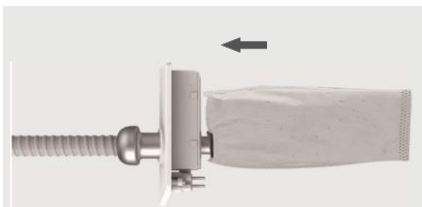

2. Priključitev napajalnega kabla
Napajalni kabel priključite na zadnji del naprave.

Pritrditev rezalnika

Pritrdite rezalnik v skladu z naslednjo sliko



Pozor,

Velikost rezalnika/nosilca je treba skrbno prilagoditi številu vrtljajev na minuto. Slabo dimenzioniran rezalnik lahko povzroči neželene vibracije in posledično poškodbe glave.

Med delovanjem ne nanašajte tekočine neposredno na glavo ali rezalnik. Tekočina se lahko vsrka skozi rezalno glavo, kar lahko povzroči poškodbe rezalnika.


Uporabite

Priprava pred uporabo

- Preverite, ali so sestavni deli rezkalnega stroja pravilno priključeni.

Vklop/izklop napajanja

1. Nastavite stikalo za napajanje na "-", da v k l o p i t e napajanje enote.
2. Stikalo za napajanje nastavite na "o", da izklopite napajanje enote.
3. Če pritisnete in pridržite hitro izbiranje, lahko vklopite in izklopite zaslon LCD ter napajanje.

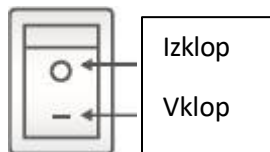

Nastavitve

Vklop/izklop sesanja in nastavitve moči

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop sesanja, da določite, ali se bo uporabljala funkcija sesanja.
2. Pritisnite gumb za povečanje ali zmanjšanje sesanja, da izberete želeno moč. -

Nastavitev hitrosti

1. Za nastavitev hitrosti obrnite kolesce za izbiro hitrosti.
2. Razpon hitrosti: 4 000 ~ 40 000 vrtljajev na minuto

Prilagajanje smeri vrtenja podajalnika


1. Pritisnite gumb za spremembo smeri vrtenja rezalnika, da izberete smer vrtenja.

Nastavitve pomnilnika

1. Za shranjevanje nastavljene vrednosti pritisnite gumb za pomnilnik za 2 sekundi.
2. Za priklic shranjenega sporočila na kratko pritisnite gumb za pomnilnik.
nastavitve.

Glava, sesanje/zaustavitev delovanja

1. Za začetek dela pritisnite gumb Start&Stop.
2. Med delovanjem pritisnite gumb Start&Stop, da ga ustavite.
3. Če se stikalo na zadnji strani ročnega nastavka med delovanjem ročnega nastavka in sesanja izklopi, se ročni nastavek in sesanje začasno ustavita, ikona hitrosti na zaslonu pa utripa.
4. Ko je stikalo vklopljeno, delujeta konica in sesanje.
5. Vklop/izklop sesanja in moč sesanja, smer vrtenja, spomin itd. lahko upravljate med delovanjem glave.

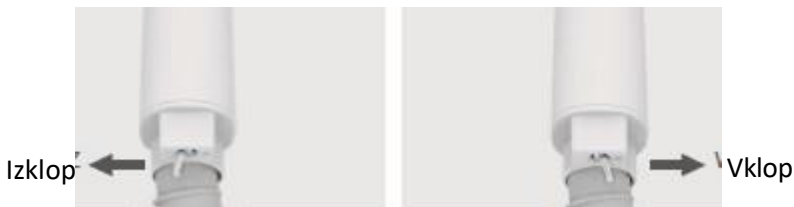

Pozor,

Če se med uporabo pojavijo nepravilnosti, takoj prekinite delo in prekinite napajanje izdelka.

Uporaba funkcije nožnega upravljalnika

Z nožnim upravljalnikom lahko hitrost števila vrtljajev nemoteno prilagajate do največje nastavljene hitrosti na rezkalnem stroju.

Za uporabo nožnega upravljalnika mora biti usmerjevalnik zaustavljen z gumbom Start&Stop in aktiviranim stikalom na glavi.

Pozor,

Nožni upravljalnik: Hitrost je mogoče prilagoditi tako, da nastavite hitrost nastavljene konice na največjo hitrost.

Vzdrževanje

Omejitve ponovne uporabe

Po uporabi izdelka je treba vse sestavne dele očistiti. Z vseh sestavnih delov takoj odstranite tujke z mehko krpo.

Priprava na čiščenje

Z odločnim, a previdnim gibom odstranite pokrov glave. Če je motor glave še vedno pritrjen v pokrovu, ga nežno potisnite ven. Nikakor ne smete vleči za kabel. Obstaja nevarnost, da poškodujete glavo.



Metoda čiščenja

Z ohišja konice in motorja z mehko krtačo odstranite tujke.



Z orodjem za čiščenje vpenjalne sponke odstranite tujke iz notranjosti vpenjalne sponke motorja.



Pozor,

Za čiščenje enote ne uporabljajte vrele vode, kemikalij, žičnih ščetk ali ultrazvočnih valov.

Po približno 10 urah uporabe izdelka zamenjajte vrečko za prah.

Shranjevanje

Vizualni pregled

1. Preverite, ali na enoti ni korozije.
2. Preverite, ali so vidna tuja telesa
3. Preverite vidne poškodbe
4. Po čiščenju izdelek ponovno sestavite in ga shranite na določenem/čistem mestu.

Zamenjava vrečke za prah

Ko se na LCD-zaslonu prižge ikona za zamenjavo vrečke, zamenjajte vrečko za prah z novo. Po zamenjavi vrečke za prah pritisnite gumb za vklop/izklop sesanja in ga držite 2 sekundi, da ikona za zamenjavo vrečke za prah izgine.

Težave

Napake

- Če pride do napake, se na zaslonu prikaže koda napake, ki omogoča takojšnjo diagnozo težave.

Koda napake	Opis napake	Preprečevanje
E1	Težava s povezavo glave	Odklopite glavo in jo ponovno priključite
		Če težava ni rešena, se obrnite na najbližjega prodajalca.
E2	Težava s kontrolno povezavo stopalo	Ponovno priključite nožno stikalo
		Če težava ni rešena, se obrnite na najbližjega prodajalca.
E3	Preobremenitev glave	Izklop in ponovni vklop naprave
		Preverite, ali v vpenjalnem držalu ni tujih teles.
		V primeru ponavljajočih se pojavov E3 se obrnite na najbližjega prodajalca.
E4	Preobremenitev absorberja	Izklopite napravo in jo po določenem času ponovno vklopite
		Zamenjava vrečke za prah
		V primeru ponavljajočih se pojavov E4, se obrnite na pri najbližjem prodajalcu na drobno.

Tehnični podatki

Specifikacije izdelka

Kategorija	Standard	Specifikacija
Vodja	Teža	364g

Nadzorna enota	Teža	2400g
	Maksimalni vrtljaji na minuto	40,000
	Poraba energije	220-240 V~, 50/60 Hz
	Dimenzije (Š x D x V)	291mmx263mmx135mm

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila sme opravljati samo pooblaščen servisier.
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - tako da tekočine ne pridejo v napravo.
4. V naslednjih primerih takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis.
 - a) je v aparat prišla tekočina, b) aparat oddaja čuden vonj, dim ali čudne zvoke, c) je poškodovan napajalni kabel, d) je aparat prevrnjen ali je poškodovano njegovo ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti iztaknite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. Ne vstavljajte ničesar v odprtino naprave. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.

8. Naprave ne postavljajte na nestabilne vozičke, police ali vozila. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti naprave.

OPOMBE:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, če so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo dovolj znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozita zdravje ali povzročita smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte navodila

pravila o odstranjevanju te vrste opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadnih električnih in

Elektronske odpadke je treba zbirati ločeno in jih odnesti na zbirna mesta za elektronske in električne odpadke.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.

OPOMBA: če zgornji postopki še vedno ne rešijo težave se obrnite na pooblaščenega serviserja, da odpravite težavo:

Luxus Plus d. o. o.

SILVER STORE

Naslov: Krekova ulica 9

Poštna številka: 2310 Slovenska Bistrica

E-pošta: info@silverstore.si

Spletna stran: www.silverstore.si